


out

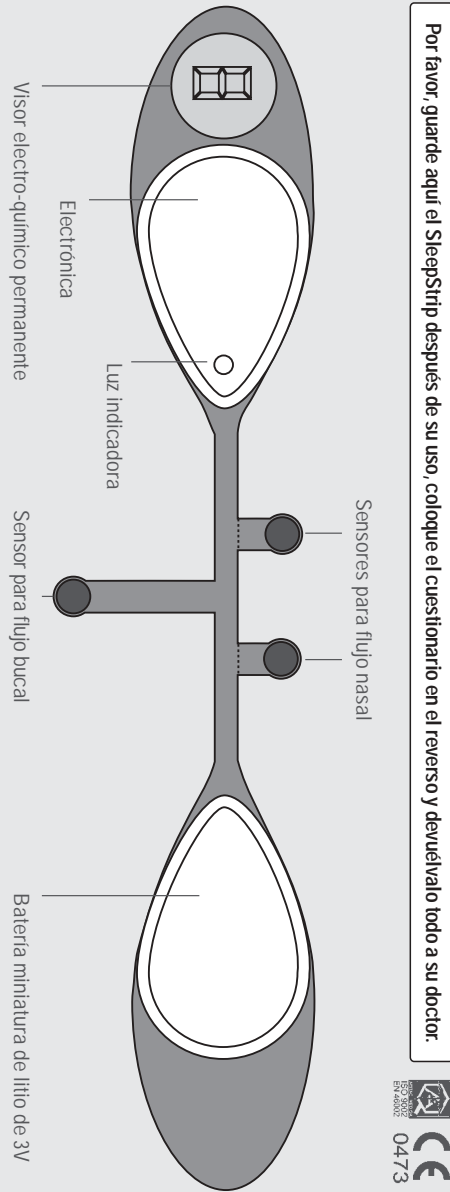

Patentes USA e internacionales aplicadas.

Agente responsable UE:
Medes Limited
9 Beaumont Hill, Radlett
Herts WD7 7AR
London, England
Tel/Fax: +44 19238 59810

Distribuido por:

Fabricado por:
S.L.P. Ltd.
18 Hazfira St.
Tel-Aviv 67779, Israel
Tel: +972 3 5371281
Fax: +972 3 5371282
E-mail: slp.ltd@slp.co.il
www.slp.co.il



SleepStrip®

Exploración Preventiva de Apneas desechable

Instrucciones de Uso

Por favor, lea y siga estas instrucciones cuidadosamente!

Contenido:
1 dispositivo SleepStrip
1 etiqueta adhesiva verde
1 esponja con alcohol

Precauciones y Advertencias



No utilice el SleepStrip si está resfriado, si tiene una congestión nasal o cualquier otro tipo de obstrucción respiratoria.

Consulte a su doctor si sufre alguna erupción o reacción en la piel donde se ha colocado el SleepStrip.

No abrir el envoltorio del SleepStrip hasta que vaya a utilizarse.

Guardar el SleepStrip que no se use en lugar seco y frío.

Condiciones ambientales para el transporte y el almacenaje:

Temperatura: 10°C-50°C, 14°F-120°F

Humedad relativa (%): 10 - 90

Presión atmosférica: 860 hPa - 1060 hPa

Item 2100 - 0022 rev.3.0

SleepStrip®

Exploración Preventiva de Apneas desechable

Instrucciones de Uso

Justo antes de ir a dormir, sacar el SleepStrip y la etiqueta verde del envoltorio.

1. Doblar los sensores de la nariz hacia delante (figura 1).
2. Sacar la esponja con alcohol del envoltorio y frotar el área del visor (figura 2).
3. Despegar la etiqueta verde del papel que la cubre y pegarla firmemente en el área del visor (figura 3). Se debería encender la luz roja.
4. Retirar el papel de protección de la parte trasera del SleepStrip y colocar el SleepStrip en la cara (figura 4).





La luz roja se debería apagar y parpadeará cada vez que Vd. exhale (el parpadeo se parará después de 20 minutos aprox.)

Nota:

El SleepStrip debe de utilizarse 5 horas por lo menos.

Por la mañana, quitarse el SleepStrip, colocarlo en el lugar indicado y devolverlo a su doctor. Cuando se quite el SleepStrip de la cara, se encenderá una luz roja.

No quitar la etiqueta verde del SleepStrip.

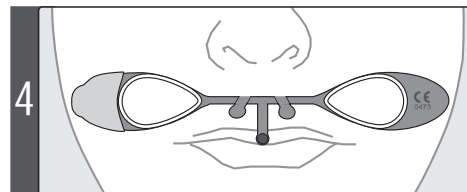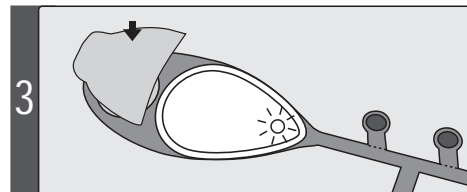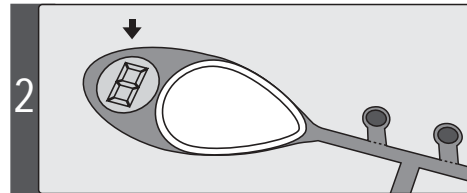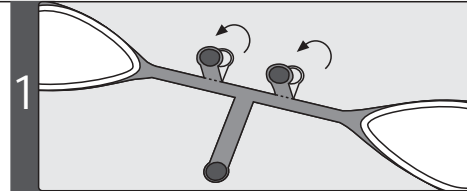

Cuestionario Apnea de Sueño:

Doctor: _____
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Edad: _____ Peso: _____
 Altura: _____ Sexo: Hombre / Mujer

Utilizando el SleepStrip:
 He dormido de _____ hasta _____

Por favor, conteste a las siguientes preguntas:

Vd. ronca? **Si** **No**

Alguna vez ha parado de respirar durante el sueño? **Si** **No**

Se levanta a menudo sintiéndose cansado? **Si** **No**

Se duerme a menudo durante el día de forma inadvertida? **Si** **No**

Sufre dolores de cabeza a menudo por la mañana? **Si** **No**

Toma pastillas para dormir? **Si** **No**

Se levanta a orinar durante la noche? **Si** **No**

Fuma? **Si** **No**

Otros comentarios:



SleepStrip®

Exploración Preventiva de Apneas desechable

Instrucciones de Uso

Por favor, lea y siga estas instrucciones cuidadosamente!

Contenido:

- 1 dispositivo SleepStrip
- 1 etiqueta adhesiva verde
- 1 esponja con alcohol

Precauciones y Advertencias



No utilice el SleepStrip si está resfriado, si tiene una congestión nasal o cualquier otro tipo de obstrucción respiratoria.

Consulte a su doctor si sufre alguna erupción o reacción en la piel donde se ha colocado el SleepStrip.

No abrir el envoltorio del SleepStrip hasta que vaya a utilizarse.

Guardar el SleepStrip que no se use en lugar seco y frío.

Condiciones ambientales para el transporte y el almacenaje:

Temperatura: 10°C-50°C, 14°F-120°F


Humedad relativa (%): 10 - 90

Presión atmosférica: 860 hPa - 1060 hPa

Por favor, guarde aquí el SleepStrip después de su uso, coloque el cuestionario en el reverso y devuélvalo todo a su doctor.



CE
0473

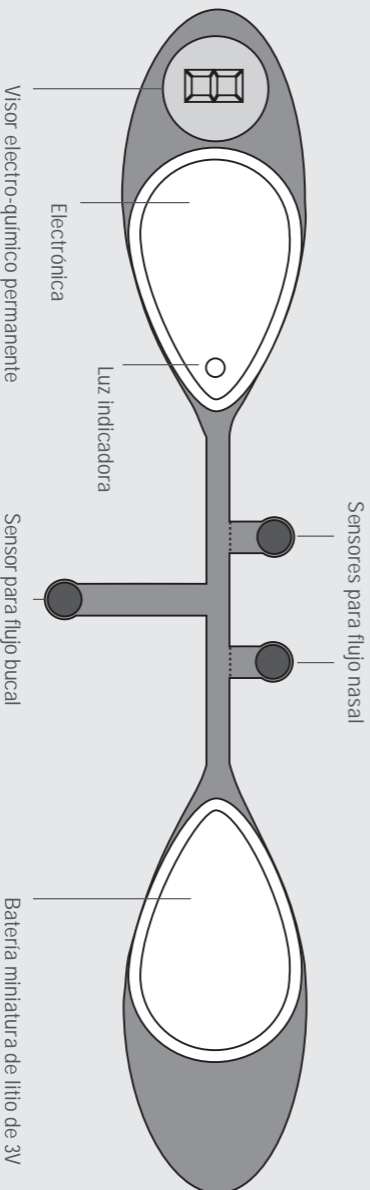

SleepStrip®

Exploración Preventiva de Apneas desechable

Instrucciones de Uso

Justo antes de ir a dormir, sacar el SleepStrip y la etiqueta verde del envoltorio.

1. Doblar los sensores de la nariz hacia delante (figura 1).

2. Sacar la esponja con alcohol del envoltorio y frotar el área del visor (figura 2).

3. Despegar la etiqueta verde del papel que la cubre y pegarla firmemente en el área del visor (figura 3). Se debería encender la luz roja.

4. Retirar el papel de protección de la parte trasera del SleepStrip y colocar el SleepStrip en la cara (figura 4).





La luz roja se debería apagar y parpadeará cada vez que Vd. exhale (el parpadeo se parará después de 20 minutos aprox.)

Nota:

El SleepStrip debe de utilizarse 5 horas por lo menos.

Por la mañana, quitarse el SleepStrip, colocarlo en el lugar indicado y devolverlo a su doctor. Cuando se quite el SleepStrip de la cara, se encenderá una luz roja.

No quitar la etiqueta verde del SleepStrip.

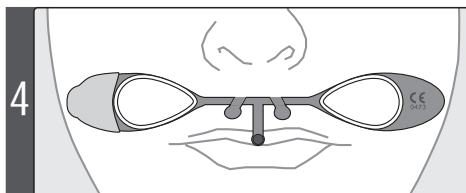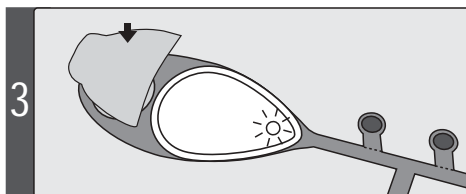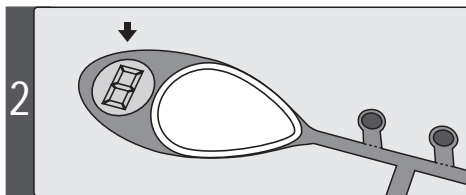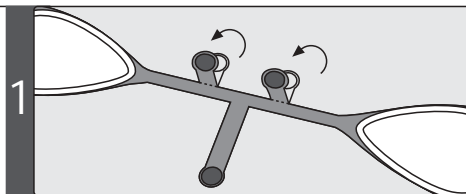

Cuestionario Apnea de Sueño:

Doctor: _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Edad: _____ Peso: _____

Altura: _____ Sexo: Hombre / Mujer

Utilizando el SleepStrip:

He dormido de _____ hasta _____

Por favor, conteste a las siguientes preguntas:

Vd. ronca? **Si** **No**

Alguna vez ha parado de respirar durante el sueño? **Si** **No**

Se levanta a menudo sintiéndose cansado? **Si** **No**

Se duerme a menudo durante el día de forma inadvertida? **Si** **No**

Sufre dolores de cabeza a menudo por la mañana? **Si** **No**

Toma pastillas para dormir? **Si** **No**

Se levanta a orinar durante la noche? **Si** **No**

Fuma? **Si** **No**

Otros comentarios:

Patentes USA e internacionales aplicadas.

Agente responsable UE:

Medes Limited
9 Beaumont Hill, Radlett
Herts WD7 7AR
London, England
Tel/Fax: +44 19238 59810

Distribuido por:

Fabricado por:

S.L.P. Ltd.
18 Hazfira St.
Tel-Aviv 67779, Israel
Tel: +972 3 5371281
Fax: +972 3 5371282
E-mail: slp.ltd@slp.co.il
www.slp.co.il